

SYNCA

要 保 存

保証書付

添付文書

取扱説明書

家庭用電気マッサージ器


医療機器認証番号：307AGBZX00049000



* \$ M I Y 9 0 0 - 1 1 *

販売名：フットマッサージャー SP25

品番：FM220

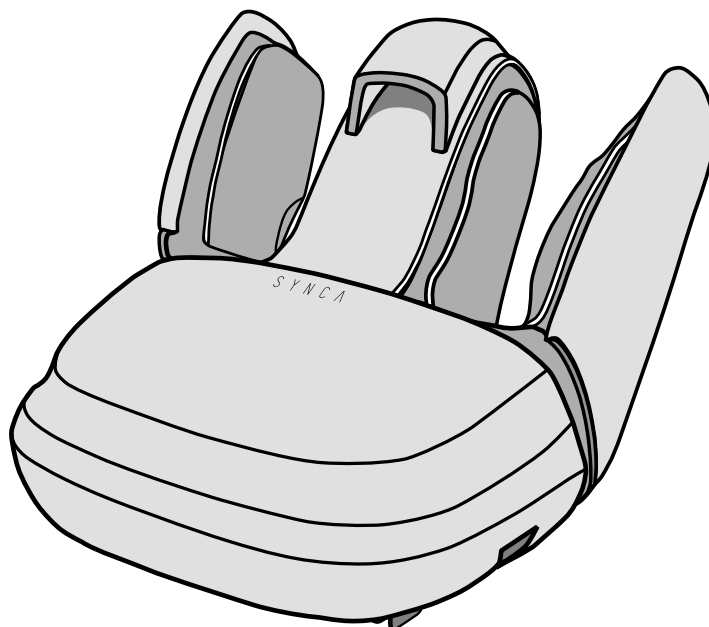

◎もくじ

.....

●安全に使用していただくために	P 1, 2, 3, 4, 5, 6
●本機の特徴	P 7
●使用目的または効果、動作原理	P 7
●各部の名称	P 8
●操作のしかた	P 9
●ご使用方法	P 10, 11, 12
●外布カバーの取り付け方と外し方(交換時)	P 13
●お手入れ・保管方法	P 14
●ご使用中に足がはさまった場合	P 15
●アフターサービスをお申し付けの前に	P 16
●愛情点検	P 17
●保証とアフターサービス	P 17
●仕様	P 18
●保証書	裏表紙

*お買い上げありがとうございます。

*本書は、ご使用前に必ずお読みください。

*使用方法、使用上の注意などを厳守して
ご使用ください。

*本機近くの見やすく、いつも同じ場所に
保管してください。

*ご使用前に、付属品を確認してください。

取扱説明書(本書) 1冊
外布カバー(本機取り付け済み) …1組2枚

安全に使用していただくために

必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

■説明内容を守らず、誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を、下記の表示(絵表示と用語)で区分し、説明しています。



警告

誤った使い方をすると「使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示(図記号)で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の例です)



禁止

⊘記号は、禁止(してはいけないこと)を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は“一般的な禁止”)が書かれています。



強制

⓪記号は、行為を強制(必ずすること)を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な指示内容(左図の場合は“一般的な強制”)が書かれています。



警告

安全に使用していただくために



禁止

■次の人は使用しないでください。

- ・医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- ・足に疾患がある人

■意思表示が出来ない人や自分で操作できない人は使用しないでください。
また、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人に単独で使わせないでください。

- ・けがや事故の原因になります。

■乳幼児や子供に使わせないでください。また、乳幼児や子供に本機のそばや上で遊ばせたり、上に乗らせないでください。

- ・けがや事故の恐れがあります。

■交流100Vで使用してください。また、変圧器を用いて使用しないでください。


- ・火災や感電、故障の原因になります。

■電源コードや電源プラグがいたんでいたり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。

- ・感電やショート、発火の恐れがあります。
- ・ご購入先または当社のお客様相談窓口にて点検・修理をご相談ください。

■電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに電源プラグを持って抜いてください。また濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。

- ・火災や感電、故障の原因になります。

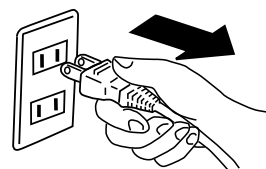


⚠ 警告 安全に使用していただくために



禁止

- 電源コードは束ねたり、本体に巻きつけて使用しないでください。また、電源コードに重い物を載せたり、はさみ込んだりしないでください。
 - ・無理な力が加わると、火災や感電、断線の原因になります。

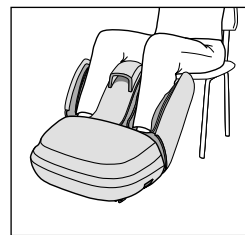

- 本機に足を入れたまま立ち上がったり、右図以外の向きに足を入れないでください。
 - ・けがや事故の原因になります。

■次の人は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害(狭心症、心筋梗塞)のある人
- ・妊娠中の人または出産直後の人
- ・生理中の人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・脚部に重度の血行障害のある人
- ・安静を必要とする人
- ・高血圧症の人
- ・けんしょう(腱鞘)炎の人
- ・体温 38℃以上(有熱期)の人
- 例1. 急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期にある人
- 例2. 衰弱している人
- ・骨粗しょう(鬆)症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の人や骨の弱い人
- ・その他身体に異常のある人や医療機関で治療を受けている人

■ご使用前に縫製部分の点検をしてください。本体布カバー及び外布カバーが破れていたり、外れた状態では絶対に使用しないでください。

- ・けがをする恐れがあります。発見した場合は使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いてください。ご自分で修理などせず、ご購入先または当社のお客さま相談窓口にご連絡してください。



強制

■本体布カバーを無理に引っ張ったり、ピンや針で突き刺したり、刃物で傷つけたりしないでください。

- ・けがや事故の原因になります。

■使用中に気分が悪くなったり刺激が強すぎて苦痛を感じた場合、しばらく使用しても効果があらわれない場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

- ・事故や体調不良を起こす恐れがあります。

■はじめは弱い刺激(短い時間)で行って、慣れてきてから刺激を調整してください。

- ・けがをする恐れがあります。

■本機に故障が発見された場合は使用を直ちに中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ・けがや事故を起こす恐れがあります。

■電源プラグは、確実に最後まで差し込んでください。

- ・事故や感電やショート、発火の恐れがあります。

■この機器で遊ぶことがないように、お子様を監視することが望ましい。

- ・けがや事故を起こす恐れがあります。

⚠ 警告 安全に使用していただくために



水ぬれ禁止

- 浴室など湿度の高い場所や屋外で使用しないでください。また、本体に水などをこぼさないでください。
 - 感電や故障の原因になります。



分解禁止

- 電源コードが破損している場合は、ご自分で交換せず、ご購入先または当社のお客様相談窓口にご連絡してください。
- 本機の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。
 - 火災や感電、故障の原因になったり、けがをする恐れがあります。
 - 点検して故障を発見した場合は、ご自分で分解したり修理せず、ご購入先または当社のお客様相談窓口にご連絡してください。

⚠ 注意 安全に使用していただくために

ご使用前の注意



禁止

- 足以外の部位や物を挿入しないでください。
 - けい部(首)には使用しないでください。
 - けがをする恐れがあります。
- 本機は家庭用マッサージ器です。業務用には使用しないでください。
- 本機は1人用です。2人以上での使用はしないでください。
 - けがをする恐れがあります。
- 素肌に直接あてて使用しないでください。
 - けがの原因になります。
- 足に装身具・装飾品などをつけて使用しないでください。
 - けがや故障の原因になります。
 - 装身具・装飾品が破損する恐れがあります。
- 足のサイズが21cm未満の人は使用しないでください。足のサイズが大きい人は、エア圧力の強さを調整して使用してください。
 - けがをする恐れがあります。
- ストッキングを着用したまま使用しないでください。
 - ストッキングが破れる恐れがあります。
- 使用しながら眠らないでください。
 - 体調が悪くなったり、けがをする恐れがあります。
- 飲酒後や疲労が激しい時には使用しないでください。また食後すぐには使用しないでください。
 - けがや事故の恐れがあります。
- 本機に強い衝撃を与えないでください。
 - 事故や故障の原因になります。

注意 安全に使用していただくために

ご使用前の注意



禁止

- マッサージ動作中に電源プラグを抜かないでください。
 - ・ けがや事故の恐れがあります。
- 電源プラグを傷つけたり、ピンやごみ、水分を付着させないでください。
 - ・ 感電やショート、発火の恐れがあります。
- ホットカーペットの上や暖房機器の近くでは使用しないでください。
 - ・ 火災や故障の原因になります。
- 他の治療器具と同時に使用しないでください。
 - ・ 体調不良や事故の原因になります。
- 他の電気製品(テレビ、ラジオ、オーディオ機器、電話、FAX等)に近づけて使用しないでください。
 - ・ 他の電気製品にノイズが入ったり、故障の原因になる恐れがあります。
- 本機を使用しながら、あるいは本機の近くで、携帯電話を使用しないでください。
 - ・ 本機が誤作動する恐れがあります。
- キャスター付きの椅子や回転機能が付いた椅子に座って使用しないでください。
 - ・ 転倒によるけがや事故、故障の原因になります。
- ほこりの多い場所や毛足の長い絨毯などの上で使用しないでください。
 - ・ 本機底面の通気孔が塞がれ、感電やショート、発火の恐れがあります。
- 足裏もみ部につま先を強く押しあてないでください。
 - ・ けがや事故を起こす恐れがあります。



強制

- 健康な場合でも、次のような人は健康をそこなう恐れがあるため、使用前に医師に相談してください。
 - ・ 加齢により筋肉の衰えた人や痩身の人
 - ・ 過去に心臓や内臓の手術をした人
 - ・ 打ち身や捻挫、骨折をしやすい人
 - ・ 乗物酔いの激しい人
- スイッチ、タイマー等が正常で安全に作動するか確認の上、使用してください。
 - ・ 感電やけがの恐れがあります。
- 本体布カバー及び外布カバー部分に異物がついていないことを確認してください。ファスナーが開いていないことを確認して使用してください。
 - ・ けがや事故の恐れがあります。
- 足挿入部内に異物が入っていないことを確認してください。
 - ・ けがや事故の恐れがあります。
- 本機は床面の水平な場所に置いて使用してください。
 - ・ けがをする恐れがあります。
- 指定の付属品(外布カバー)を使用してください。(出荷時には取付済)
 - ・ けがや事故、故障の原因になります。



注意 安全に使用していただくために

ご使用前の注意



強制

- しばらく使用しなかった場合は、本機が正常に作動するか確認してください。
 - ・けがや事故の恐れがあります。
- コードは容易に離脱しないよう、正しく確実に接続してください。
 - ・ショートや発火の恐れがあります。

ご使用中の注意



禁止

- 定められた使用時間を越えないようにしてください。
 - ・1回の使用時間は10分以内にしてください。長時間の使用は筋肉や神経に対し必要以上の刺激を与え、逆効果になることがあります。
 - ・続けて使用する場合は10分以上休んでください。1日あたりの使用時間は通算して30分以内とってください。
 - ・体調不良やけがの原因になります。
- 足のマッサージ以外の目的で使用しないでください。
 - ・けがや事故、故障の原因になります。
- 手などを入れて使用しないでください。
 - ・けがをする恐れがあります。
- 本機が動作中に足を出し入れしないでください。
 - ・けがをする恐れがあります。
- 電源コードを持って本機を持ち上げたり、電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。
 - ・火災や感電、故障の原因になります。
- 布団や毛布等をかぶせて使用しないでください。
 - ・火災や感電、故障の原因になります。
- 機械内部に水が入らないようにしてください。
 - ・火災や感電、故障の原因になります。
- 使用中電源コードが体に巻きつかないように注意してください。
 - ・けがや事故を起こす原因になります。
- 本機の上に立ったり、不安定な姿勢や無理な体勢で使用しないでください。
 - ・けがをする恐れがあります。
- エアバッグに故意に力を加えたり、尖ったもので傷つけたり、膨らんだエアバッグを踏みつけたりしないでください。
 - ・けがや事故、故障の原因になります。
- 本機を寝かせた状態で使用しないでください。
 - ・けがや事故、故障の原因になります。

⚠ 注意 安全に使用していただくために

ご使用中の注意



強制

- 本機に異常を感じたり、停電などを含む緊急時には、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。
 - ・けがや事故を起こす恐れがあります。
- 刺激が強すぎると感じた場合は、厚手の靴下等を履いて使用してください。
 - ・けがや事故を起こす原因になります。
- 必ず外布カバーを取り付けて使用してください。(P13 参照)
 - ・けがや事故を起こす恐れがあります。
- 身体に異常を感じた場合は、使用を直ちに中止してください。
 - ・けがや事故の恐れがあります。
- 本機の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
 - ・事故や健康をそこなう恐れがあります。


ご使用後の注意




プラグ
を抜く

- 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源コードは、ねじれをまっすぐに直して保管してください。
 - ・ホコリや湿気による絶縁の劣化から、漏電火災の原因になります。
 - ・乳幼児や子供がけがをする恐れがあります。

- 持ち運ぶときは、本機底面または中央の取っ手をしっかり持って運んでください。
 - ・けがや故障の原因になります。

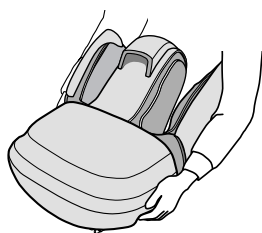

底の両側を持つ場合

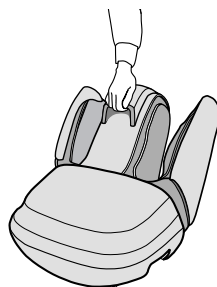

取っ手を持つ場合






強制

- 必ずスタンドを収納し、本機を立てた状態で保管してください。
 - ・けがや故障の原因になります。



スタンドを収納する

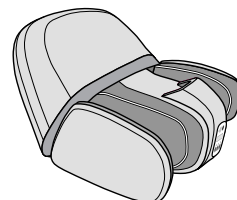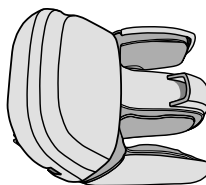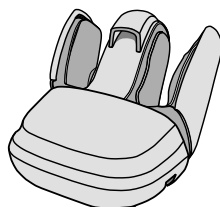

本 機 の 特 徴

■足裏ローラー&エアバッグ&モミボードで快適マッサージ

指先～土踏まず～かかとをカバーする3軸ローラーと足側面、足首、足先に配置されたエアバッグが足全体を多面的かつきめ細やかにマッサージします。また、専用のモミボードにより、ふくらはぎの後ろ側まで包むようにもみ上げます。

■土踏まずに力強い指圧感を与えるミニローラー

土踏まずローラーに自由回転するミニローラーを組み込みました。
土踏まずに力強く、変化に富んだ刺激を与えます。

■アキレス腱をつかむ足首エアバッグ

足首エアバッグに突起をプラス。
足首に圧を加えつつアキレス腱を両側からギュッとつかむ二段階の心地良さ。

■効果的にプログラムした治療コース

ローラーとエアバッグの良さを効果的に組み合わせた2つの自動コースを搭載しました。

■お好みに合わせた圧力調整

エアバッグの圧力は弱・中・強の三段階の強さからお選びいただけます。

■足の挿入が楽な背面フリータイプ

背面が開いていますので、足を高く持ち上げずに足の出し入れが楽に行えます。

■使用条件に合わせて使えるスタンド付き

製品本体に傾斜をつけることができ、無理の少ない姿勢でマッサージができます。

■オートタイマー機能

10分タイマー内蔵ですので、適切な時間でご使用いただけます。

■お手入れ可能な外布カバー

外布カバーは取り外してお手入れ可能。いつでも清潔さを保てます。

■危険を回避する安全装置搭載

過度な負荷(異物等が挟まった時など)がかかった場合に自動停止する機能の「過負荷保護装置」、機械の異常な発熱を防ぐ「過熱防止装置」を搭載しています。

使用目的または効果

[あんま、マッサージの代用] 一般家庭で使用する。こと。

疲労回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる・筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

動 作 原 理

モーターの回転により、回転ローラーが足裏を、モミボードがふくらはぎをマッサージする。
また、エアポンプの動作により、エアバッグが足側面・足首・足先をマッサージする。

各部の名称

製品本体

ふくらはぎもみ部
(モミボード)

取っ手

足・足裏もみ部

本体上部

操作パネル
(詳しくはP 9)

外布カバー
左右1枚ずつ

(付属品)
※本機取付済

注意
シール

注意
シール

足挿入部

電源プラグ
AC100V 専用

電源コード

製品底面


スタンド

定格シール
製造番号シール


通気孔

操作パネル

取扱説明書

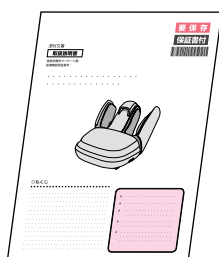

操 作 の し か た

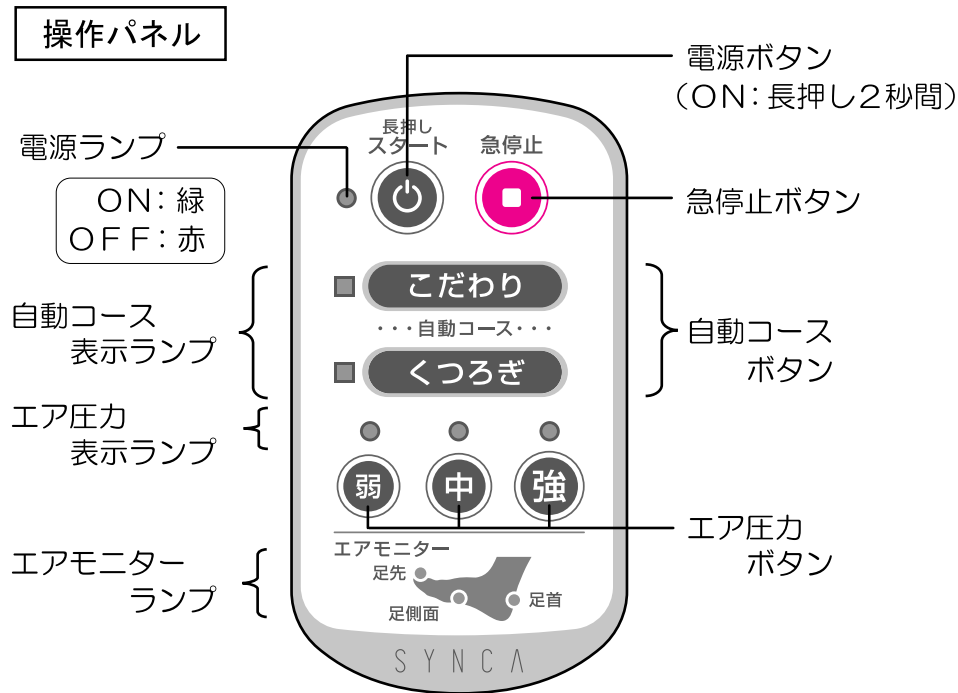

1. 電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込みます。(電源ランプが赤色に点灯します。)

2. 椅子等に座り、停止時に足挿入部から足を入れます。

※ 出荷時は、モミボードが閉じた状態で梱包されています。初めて使用するときは、一度電源「ON」後、「OFF」し、モミボードが収納位置(モミボードが開いた状態)に戻ってから脚を入れてください。

3. 操作パネルの「電源ボタン」を長押しします。(注 約2秒間押し続ける)
電源ランプが「OFF」を示す赤色から「ON」を示す緑色に変わります。
「こだわり」コース・エア圧力「弱」でマッサージがスタートします。

4. お好みにより“自動コースボタン”、“エア圧力ボタン”を押して動作を選択してください。

◎ “自動コースボタン”で2種類のコースからお好みに合わせて選択してください。

【こだわり】コース …ふくらはぎをマッサージしながら、変化に富むリズムで組み合わせたエアとローラーの複合コース。

【くつろぎ】コース …ふくらはぎをマッサージしながら、一定のリズムを繰り返す、ローラー中心のコース。

◎ “エアモニターランプ”は、エアマッサージしているところを点灯して知らせます。

◎ “エア圧力ボタン”で3段階の中から好みの強さを選択してください。

◎ オートタイマーにより、「電源ボタン」を押してから約10分後にマッサージは自動的に終了します。

5. コースの途中でマッサージを終了する場合は、「電源ボタン」を押してください。“ピ、ピ、ピ…”音と共にモミボードが何度か動き、収納位置(モミボードが開いた状態)で止まります。

※ 緊急時、その場で停止させたい場合は「急停止ボタン」を押してください。

この場合、モミボードはそのままの位置で即時停止します。閉じた位置で停止した場合は、再度電源「ON」後、「OFF」し、モミボードが収納位置に戻ってから脚を抜いてください。

6. 動作終了後、エアバッグから空気が完全に抜けてから、片足ずつゆっくり足を抜き出してください。

7. 使用後は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

ご 使 用 方 法


使用時間について

- ※ 1回の使用時間は10分以内にしてください。
長時間のご使用は筋肉や神経に対して必要以上の刺激を与え、逆効果になることがありますのでご注意ください。
- ※ 続けて使用する場合は10分以上休んでください。
1日あたりの使用時間は通算して30分以内とってください。

⚠ 注意 はじめは弱い刺激で行ってください。


■足をマッサージする（座ってご使用になる場合）

1. 椅子等に座って、膝の角度が90度位になるような姿勢にします。
2. 停止時、足挿入部から足を入れます。
3. 足先部、土踏まず部、かかと部のローラー、足先、足側面、足首のエアバッグやモミボードに合わせて、好みの位置に足を移動させてお使いください。

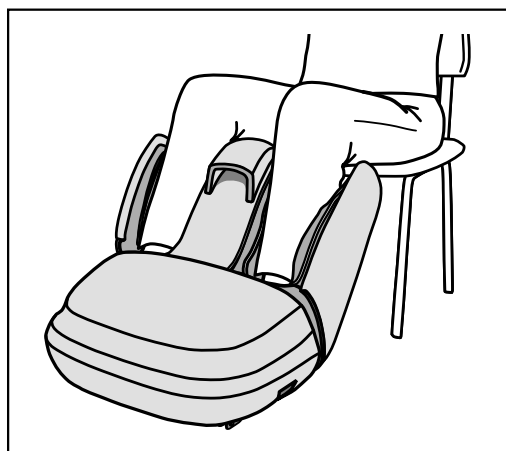

◎ 足裏マッサージ方法(下図)


- (1) 土踏まずを中央の突起に合わせて、足裏全体をマッサージできます。
- (2) 足先を重点的にマッサージしたい場合は、足先側に足を移動させてください。
- (3) かかとを重点的にマッサージしたい場合は、かかと側に足を移動させてください。

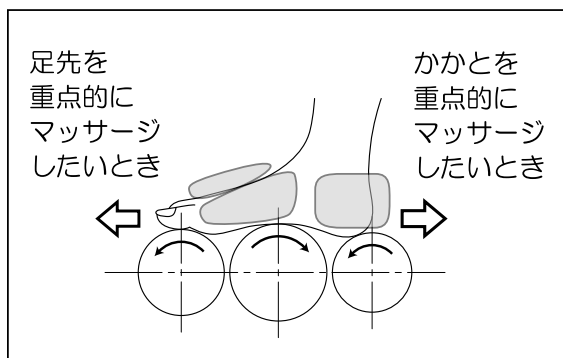

※ マッサージの刺激の感覚は、個人差があります。ご自身のお好みに合った位置で、マッサージを行ってください。

※ エアバッグの空気が抜けている時に、足を移動させてください。

- ◎ くるぶしのかかと側のくぼみ(斜線部)に足首エアバッグの突起があたるようにすると、かかとにしっかりとエアバッグの圧が伝わり、マッサージできます。

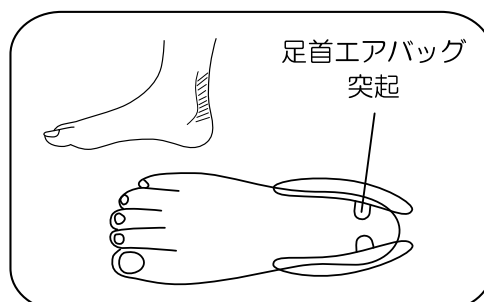


ご使用方法

4. ふくらはぎ部分はお好みに合わせて膝を前後に動かして、マッサージ感を調節してください。

◎ ふくらはぎマッサージ方法(右図)

- (1) 弱い刺激でふくらはぎをもみたい場合は、膝を若干前に出してください。
- (2) 標準的にマッサージしたい場合は、ふくらはぎもみ部の中央部分に合わせてください。
- (3) 強い刺激でふくらはぎをもみたい場合は、膝を後ろに下げ、ふくらはぎもみ部の後方でしっかり包むようにマッサージを行ってください。

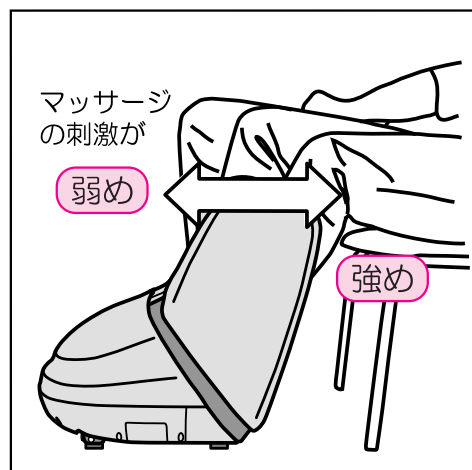

※ 刺激の程度により、本機からの音の発生が異なりますが、構造上発生するもので、異常ではありません。(P16、「アフターサービスをお申し付けの前に」参照)



注意

- ・ 本機に足を入れたまま立ち上がったり、ローラー部やふくらはぎもみ部に無理な力を加えないでください。
- ・ 刺激が強すぎて苦痛を感じた場合、直ちに使用を中止してください。



お知らせ

※ご使用中無理な力が加わったり、異物をはさまったりした場合、安全のため動作が止まることがあります。(P15参照)

※その場合は障害を取り除き、電源プラグをコンセントから抜き、約10秒後に再度電源プラグをコンセントに差し込み、「電源ボタン」を押してください。

■スタンドを立ててご使用になる場合

本機底面のスタンドを立て、本機を傾けてご使用ください。低めの椅子に座って使用すると、足指マッサージ感が深くなり、また、楽な姿勢でマッサージを行えます。

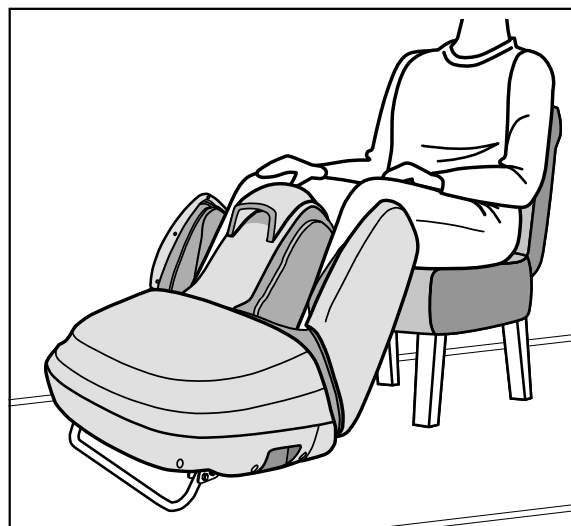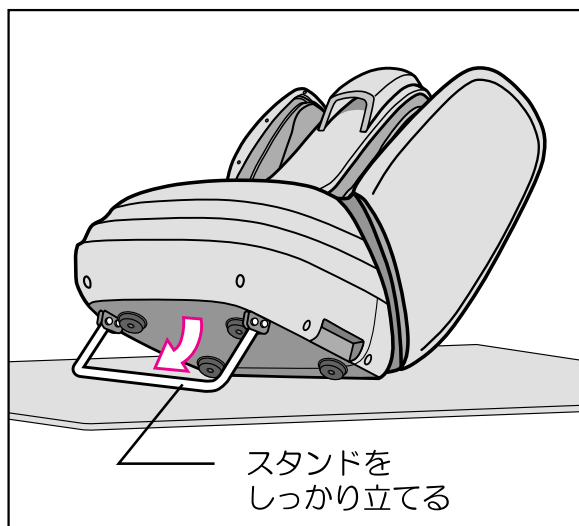

ご 使 用 方 法



注意

スタンドを立てる際は、最後までしっかりと引き出してください。
不安定な状態で使用した場合、スタンドが元に戻り、本機が落ちてけがや故障の原因になります。

■板の間などの硬質の床でご使用の際、
振動や動作音が気になる場合

板の間など硬い材質の床の上でご使用の際、振動や動作音が気になる場合はマット等を本機の下に敷いてください。



外布カバーの取り付け方と外し方（交換時）





※出荷時には、本機に外布カバーが左右それぞれ取り付けられています。

⚠ 注意 必ず外布カバーを取り付けて使用してください。

⚠ 注意 面ファスナーは、正しい方向で奥に付けてください。



■外布カバーの取り付け方

1. 外布カバー着脱の際には、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから作業してください。
2. 面ファスナーの側を下にして、外布カバーに足(または手)を入れてください。
3. マッサージ機本体の足挿入部から、足(または手)を挿入します。
4. 足(または手)をなるべく奥まで差し込み、つま先部の面ファスナーを本体布カバーに貼り付け固定します。(この時、カバーを軽く引っ張り、しっかり貼り付いたか確認します。)

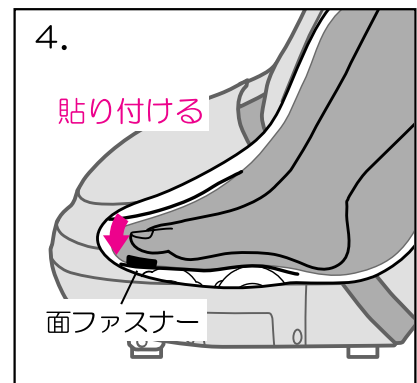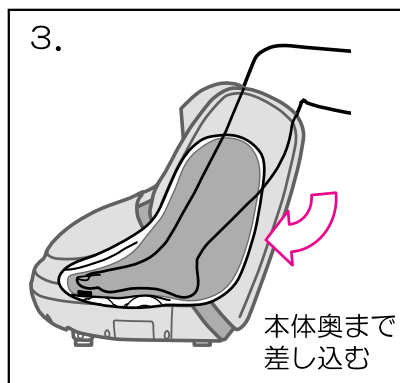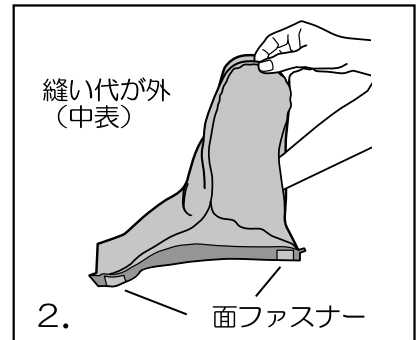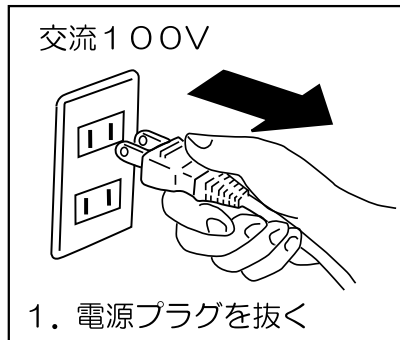

5. 本体布カバーと外布カバーのスライドファスナーを合わせゆっくり閉めます。ファスナーが一番下まで確実に閉めてください。
6. 外布カバーのかかと部分の面ファスナーを本体布カバーに貼付けます。

- ※ 時々、外布カバーがずれていないか確認し、ずれている場合は貼り付け直してください。
- ※ 間違った取り付け方をすると、足が入れにくくなったり、外布カバーが外れやすい原因となります。

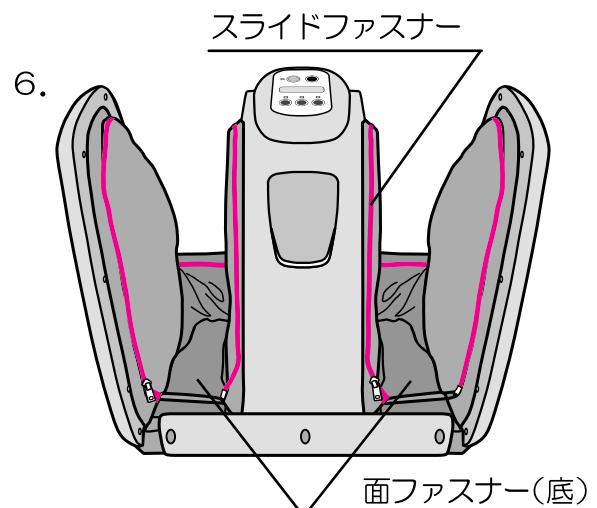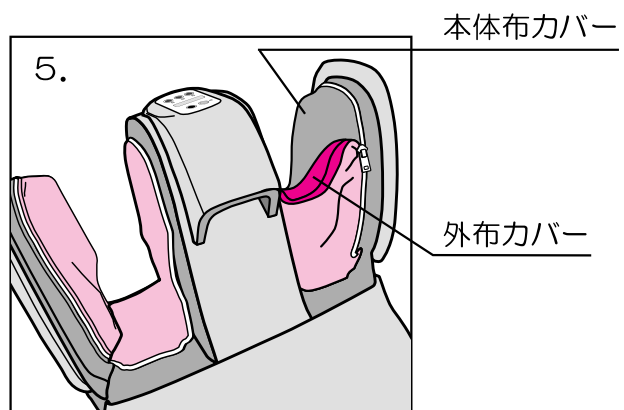

本体布カバーは、絶対に取り外さないでください。


■外布カバーの取り外し方

スライドファスナーを端から端まで全て外し、面ファスナーをはがしてから、外布カバーを引き抜いてください。

お手入れ・保管方法

お手入れ・保管

- お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
 - ・感電やけがの原因になります。
- 本体の汚れはぬるま湯か石鹸水を含ませよく絞った柔らかい布で拭き取ってください。
 - ・シンナー、ベンジン、漂白剤は使用しないでください。破損や変色の原因になります。
 - ・本体布カバーは外すことができません。
- 入浴剤(特にイオウ成分を含んだもの)やシャンプー、整髪料などが生地に着した時は速やかに乾いた布で拭き取ってください。
 - ・変色やシミの原因になります。
- 機器及び付属品等は次回の使用の際に支障のないよう清潔に保ち、湿気・ほこりの少ない場所に保管してください。
 - ・けがや故障の原因になります。
- 直射日光が当たる場所や、ストーブ等の近くで高温になる場所は避けてください。
 - ・変色や故障の原因になります。
- スタンドを収納し、本機を立てて保管してください。
 - ・けがや故障の原因になります。

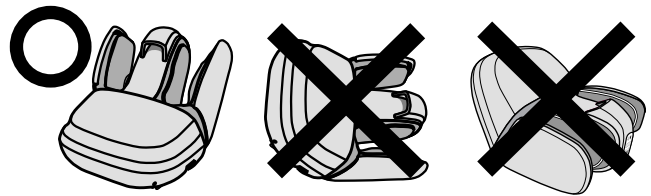

- 乳幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。
 - ・乳幼児や子供がけがをする恐れがあります。

外布カバーのお手入れ

外布カバーは消耗品です。破れなどが発生した場合はご購入先に連絡し、直ちに新品と交換(有料)してください。




- 外布カバーは、ドライクリーニングに出すことをお勧めします。
 - ・ご家庭でのお洗濯も可能ですが、色移りを防ぐため、単独で洗ってください。
 - ・アイロン掛けはしないでください。

ご使用中に足がはさまった場合

ご使用中に足がはさまった場合

停電等でご使用中に本機が停止し、万一、足がはさまってしまった場合には、以下の手順で、片足ずつゆっくり足を抜いてください。

1. 操作パネルの「急停止ボタン」を押し続けます。
ボタンを押している間、エアバッグ内の空気が抜けます。
2. エアバッグから完全に空気が抜けたら、本機の側面を両手でおさえながら、後ろに傾けます。
3. ひざを持ち上げるようにして、一方の足先を本機の前方向へとゆっくり引き抜きます。
4. もう一方の足先も、同じようにゆっくりと引き抜きます。
5. 本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。
停電等が回復したことを確認します。その後、電源プラグをコンセントに差し込み、再度「ON」後、「OFF」し、モミボードを収納位置（開いた状態）に戻してください。

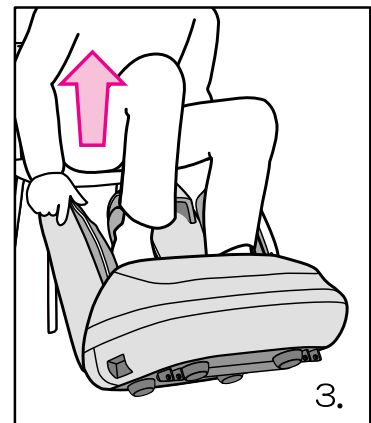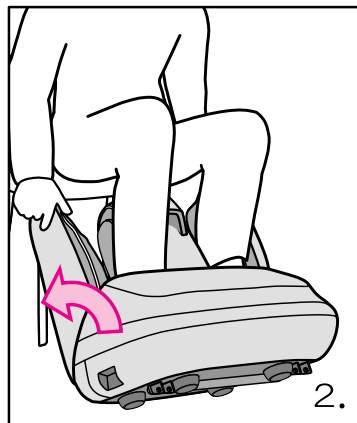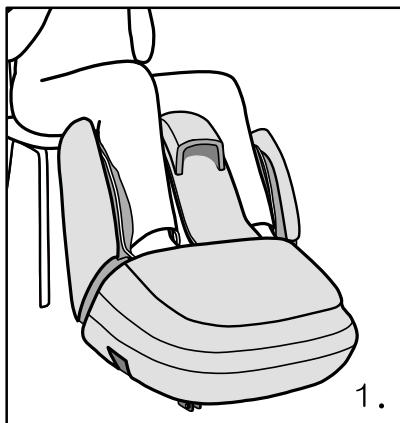

途中で動作が止まる場合の表示・現象



■操作パネルのエア圧力「強」ランプが点滅して止まった場合
過度な負荷（異物を挟んだり、ご使用中無理な力を加えた等）で、お使いになっていませんか？

・対処方法

負荷を取り除いてから、再度操作パネルの「電源ボタン」を押してください。

■停止後、操作パネルの「電源ボタン」操作が無効の場合

連続でお使いになっていませんか？

・対処方法

電源プラグをコンセントから抜いて、1時間程度休んで本機を冷ましてからお使いください。

アフターサービスをお申し付けの前に

現 象	ここを点検してください	処置方法
動作しない	電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	「電源ボタン」を長く押していますか？	「電源ボタン」を2秒以上、長押ししてください。
途中で止まった	操作パネルのエア圧力「強」ランプが点滅していませんか？	負荷のかけ過ぎです。負荷・障害を取り除いて操作パネルの「電源ボタン」を押してください。
	タイマー(10分)が働き、電源が切れていませんか？	操作パネルの「電源ボタン」を押してください。
	停止後、操作パネルの「電源ボタン」操作が無効ですか？	連続で使用のし過ぎです。 1時間程度休んで本機を冷ましてからお使いください。(P15 参照)
ケース表面が温かい	連続でお使いになっていませんか？	共に異常ではありません。10分程度休んでから使用してください。 また使用後は安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。
	電源プラグがコンセントに差し込まれたままになっていませんか？	
動作中、 ・ローラーと布がこすれる音 ・ローラー、モーターの動作音や回転音 ・エアポンプの動作音、吸気排気音 ・もんでいるときの「ズーズー」という音 ・もみ部が開くときの「グワァグワァー」という音	構造上発生する動作音です。	異常ではなく、機能等に影響はありません。 また、これら動作音の床への共鳴音の場合もありますので、本機下にマット等を敷くと改善する場合があります。(P12 参照)

- ・上記の他に選択した動作と異なる動作をした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、約10秒たってから、再度電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ・これらの処置をされても異常があるときは、ご購入先または当社お客様相談窓口にご相談ください。尚、その際はご購入の販売名、品番、製造番号、お買い上げ時期、故障状況等をお知らせください。(製造番号は、本機底面の定格シールに記載)

消耗品のお求めについて

消耗品(外布カバー)のお求めは、ご購入先または当社お客様相談窓口へお問い合わせください。

愛情点検

⚠ 注意

しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。



愛情点検

長年ご使用の場合は
点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- 電源コード、電源プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

お願い

- 本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

保証とアフターサービス

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

● 保証書

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 保証書に記載

● 補修用性能部品の保有期間

当社は本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

P16 に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

● 保証期間中に修理を依頼される場合

ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。（なお、保証期間中でも有償修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。）

● 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

まずご購入先にご相談ください。修理により、製品機能が維持できる場合には、ご希望に従い有料にて修理いたします。

● その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。修理料金は、ご購入先、または当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

技術料 診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

医療機器の修理に関して

本製品は医療機器です。医療機器の修理には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき修理する商品および修理の方法に応じて厚生労働省令で定める区分に従い、事業所ごとで許可を受けた修理業者による修理が必要です。この為、お客様ご自身での分解・修理のご要望はお受けできませんのでご了承ください。

仕 様

*回：2重絶縁構造を表します。
※ 改良のため一部仕様を変更する場合があります。

医 療 機 器 の 区 分	管理医療機器
類 別	機械器具(77)バイブレーター
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器 (JMDN コード 34662000)
販 売 名	フットマッサージャー SP25
品 番	FM220
医 療 機 器 製 造 販 売 認 証 番 号	307AGBZX000049000
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	65W 回*
定 格 時 間	30 分
オ ー ト タ イ マ ー	10 分
も み 動 作 速 度	10～55 回 / 分
工 ア 圧 力	60kPa 以下
材 料	ケース：ABS 足挿入部：ポリエステル
安 全 装 置	過熱防止装置、過負荷保護装置
質 量	約 14.5kg
寸 法	幅 480 × 奥行 520 × 高さ 495 (mm)
動 作 保 証 条 件	温度：0～40℃ 湿度：0～80% (結露なきこと)
電 気 的 安 全 性	電気用品安全法技術基準適合確認済
生 産 国	中国
販 売 元	株式会社フジ医療器
製 造 販 売 元	株式会社 BHS 静岡県藤枝市八幡 550 番 1 TEL：054-644-4120

FUJIIRYOKI

フットマッサージャー 保証書

持込修理

販 売 名	フットマッサージャー SP25	品 番	FM220	製 造 番 号	
保 証 期 間	お買い上げの日から1年間		保 証 対 象	本 体（但し、消耗品は除く）	
ご 購 入 者	フリガナ		お買い上げ日	年 月 日	
	ご芳名	様	ご 購 入 先		
	ご住所				
	電話 ()			電話 ()	

※ 製品をご購入の際は、保証書にお買い上げ日及びご購入先が記入されているかご確認ください。記載がない場合は、ご購入先へお申し出いただくか、納品書、レシートなどお買い上げ日及びご購入先が分かる書類を添付して大切に保管してください。

【無料修理規程（一部抜粋）】保証の範囲や消耗品について、詳しくはフジ医療器ホームページ内「メーカー保証規程」、もしくはお客様相談窓口にてご確認ください。

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ① 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入先にお申し出ください。
 - ② ご購入先に無料修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合、修理のご依頼先等は、ご購入先または取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるご購入先に修理のご依頼できない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合などには有償修理になります。※故障及び損傷の状況によっては修理できない場合もございます。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ② 購入後の取扱いが適正でない為に生じた故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ 本書の提示がない場合
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、ご購入者名、ご購入先の記入のない場合、或いは字句を書き替えた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

年 月 日	修 理 内 容 及 び 使 用 部 品	担 当 者

※ お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の点検活動のため記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-027-612

お客様相談・サイバーセキュリティ問合せ窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずご購入先へご連絡ください。

フリーダイヤル ☎ **0120-027-612** 受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
※土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く。

FAX・Webでの受付も行っております。

FAX番号 **06-4793-0818**

Web フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

フジ医療器ホームページ **www.fujiiryoki.co.jp**

FAX・Webでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL

2025年8月28日(第1版)